

## Hjärtstartaren ZOLL AED Plus

---



## Vad ingår i leverans

---

- Hjärtstartaren
- Lock
- Batteripack
- Vuxenelektrod
- Fp med sax, rakhyvel, munskydd, handskar och papper
- Bruksanvisning
- Väska med er logotyp
- Hjärtstartaretikett/skylt
- Informationsblad om registret samt ert kursutbud

## AED Plus - inte bara en hjärtstartare




## Specifikationer

---


- Enkel att använda
- Underhållsfri
- Utför automatiska självtester
- 5 års standby tid (batteripack & elektrod)
- Inbyggd funktion för HLR-hjälp
- Använder vanliga batterier
- Hög tålighet mot vatten och damm/smuts (IP55)
- Hjälper fria luftvägar
- Bildskärm

# Översikt

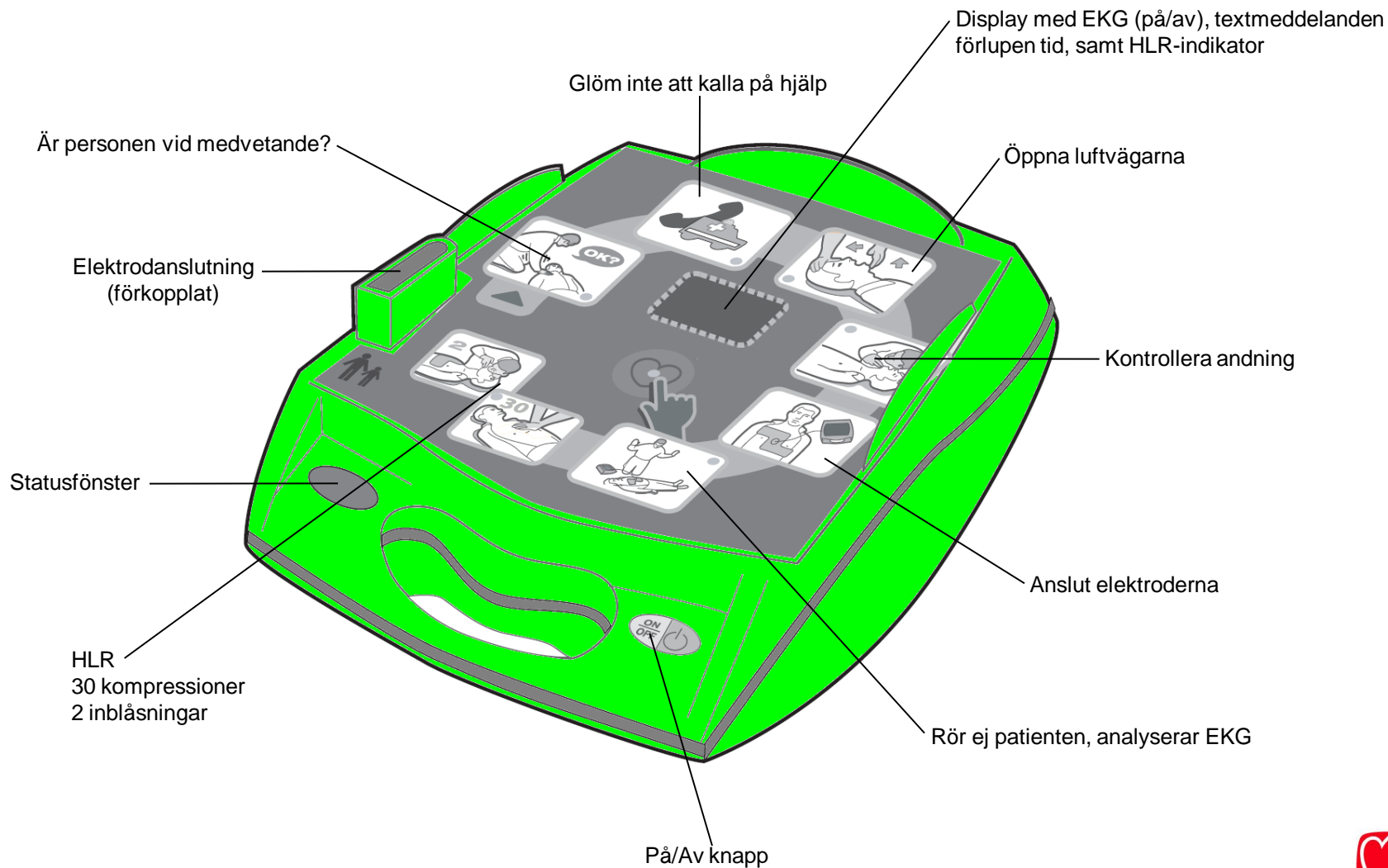

## Lock som underlättar fria luftvägar

---

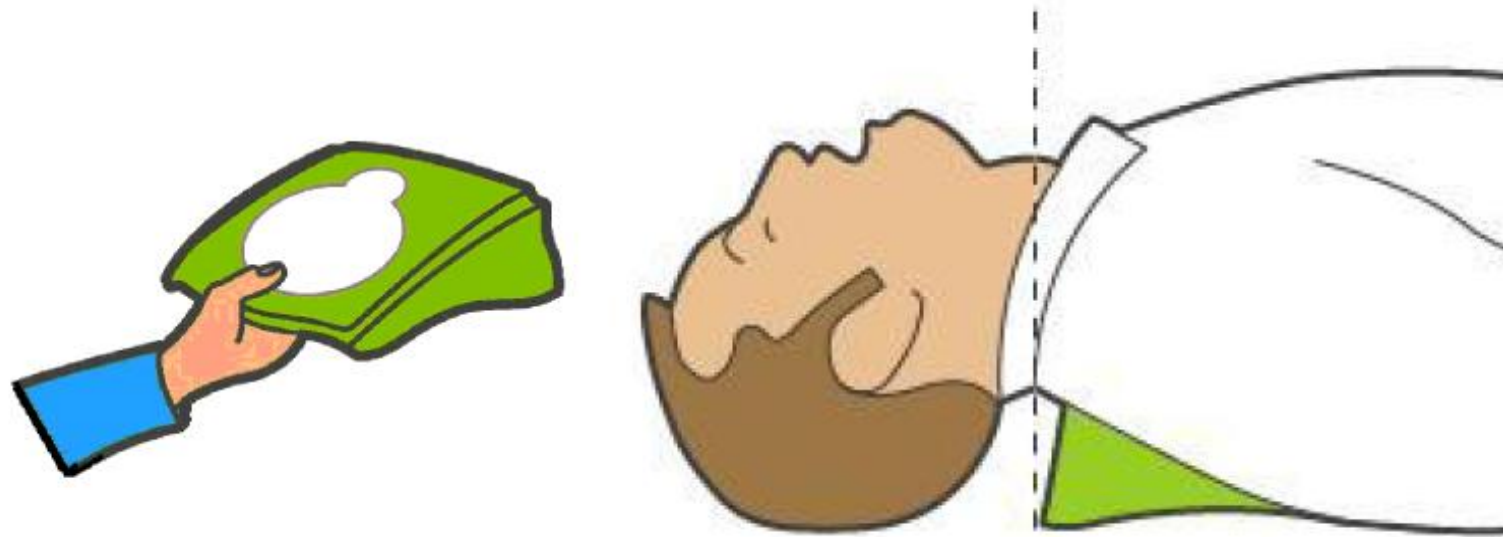



Chocker:2

04:35

**TRYCK HÅRDARE**





## Gör klar för användning – installera batterier

---






## Gör klar för användning – anslut elektroderna




## Självtest utförs

---

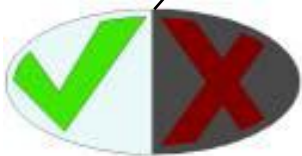


Bekräfta att grön bock visas = KLAR FÖR ANVÄNDNING

## Automatiska själttester utförs regelbundet

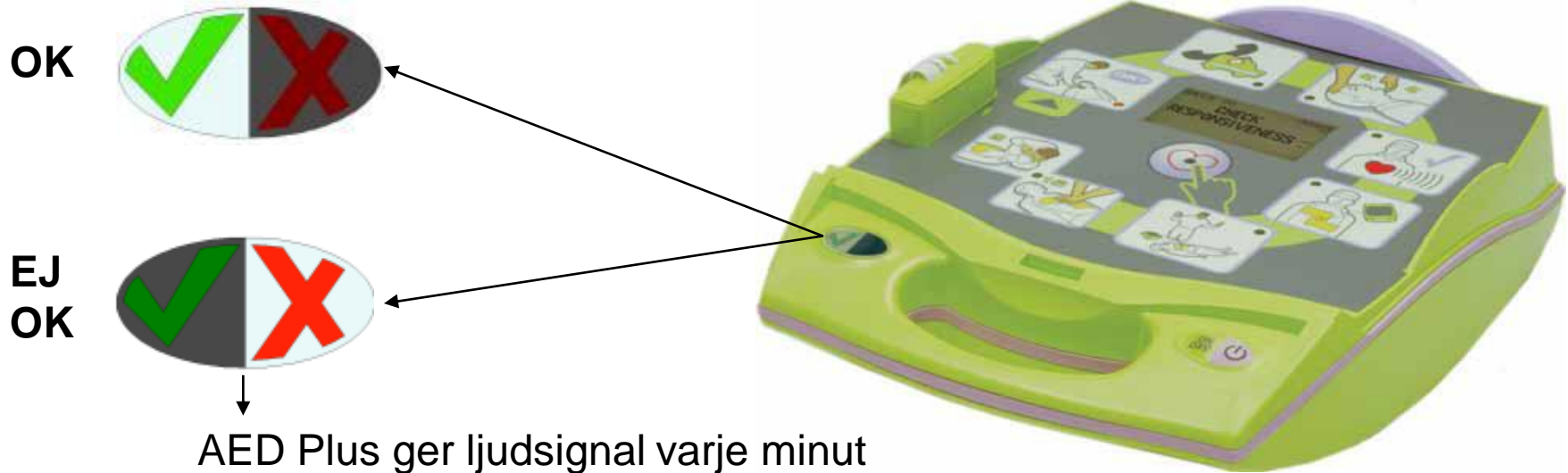

- Testar bl.a. batteristatus, elektrodkoppling, interna tester och intern urladdning.
- Efter 5 år visar indikatorn EJ OK – batteripack och elektrod byts.

## Elektrod med HLR-sensor och 5 års hållbarhet

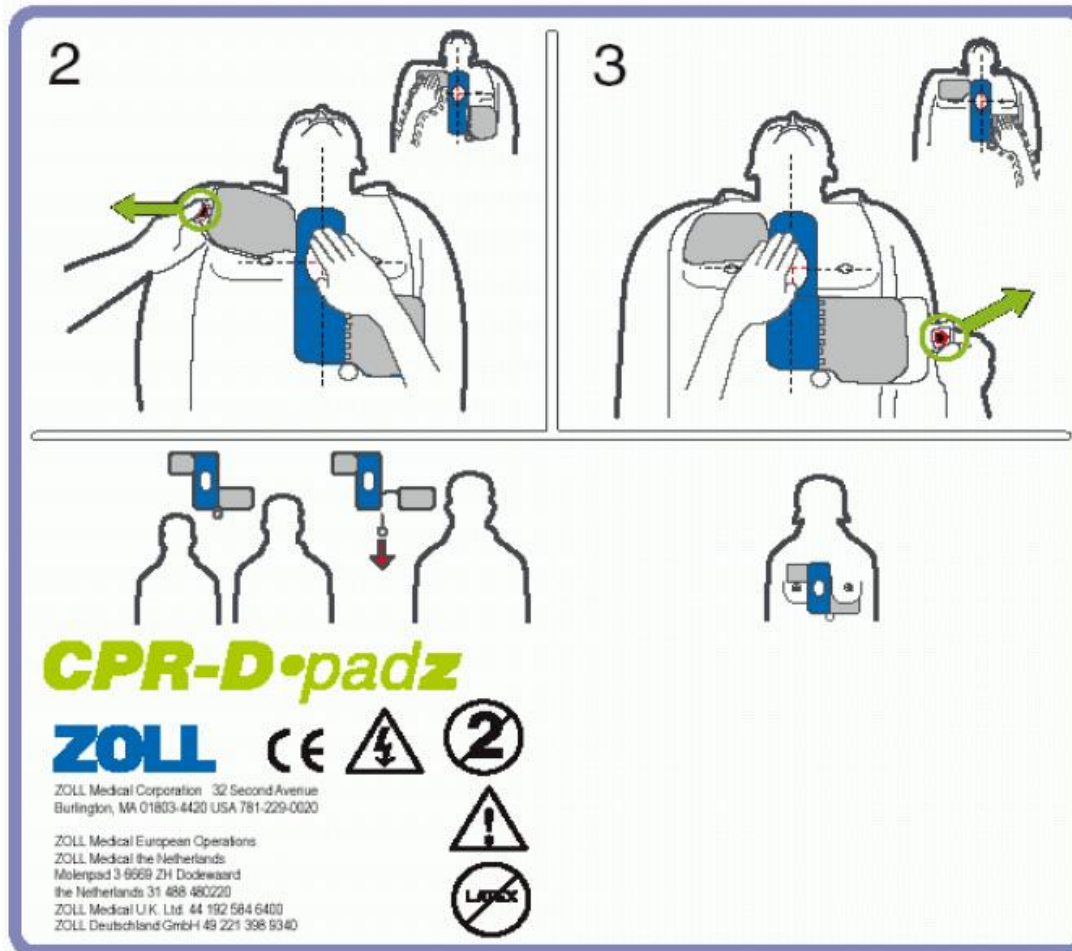

Inkluderar kit med:




- Munskydd
- Handskar
- Sax
- Rakhyvel
- Papper
- Sprittork

## Barnelektrod med 2 års hållbarhet (tillval)

### *pedi-padz*™ II

#### Infant/Child Defibrillation Electrodes

0-8 Years <55lbs / 25kg

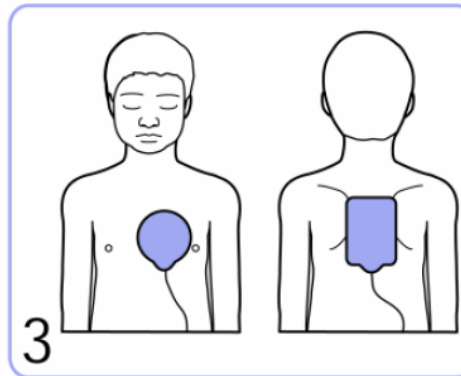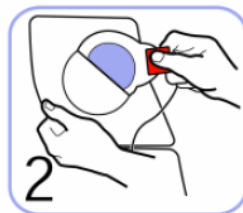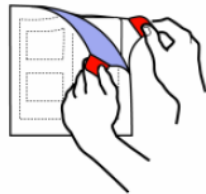

**ZOLL** CE 0197

ZOLL Medical Corporation 269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824-4105 USA 978-421-9655

9305-0627-01 Rev. 1

## Gör klar för användning

---



Kontrollera att redo-  
indikatorn visar grön  
bock



# Användning

---



Starta



## Användning



- Följ instruktionerna som ges.
- Öppna locket.
- Ta fram elektroderna.

## Användning



- Anslut elektroden som bilden visar.

## Användning



- Analyserar, rör inte den drabbade.

# Användning

---



- Utför HLR.